


A E D（自動体外式除細動器）

《心臓突然死から命を守ります》

本組合では、心肺停止状態に陥った方の救命率・社会復帰率の向上を図るため、A E D（自動体外式除細動器）を、下記のところに設置しました。

【東大阪都市清掃施設組合 管理棟 1階玄関ホール】

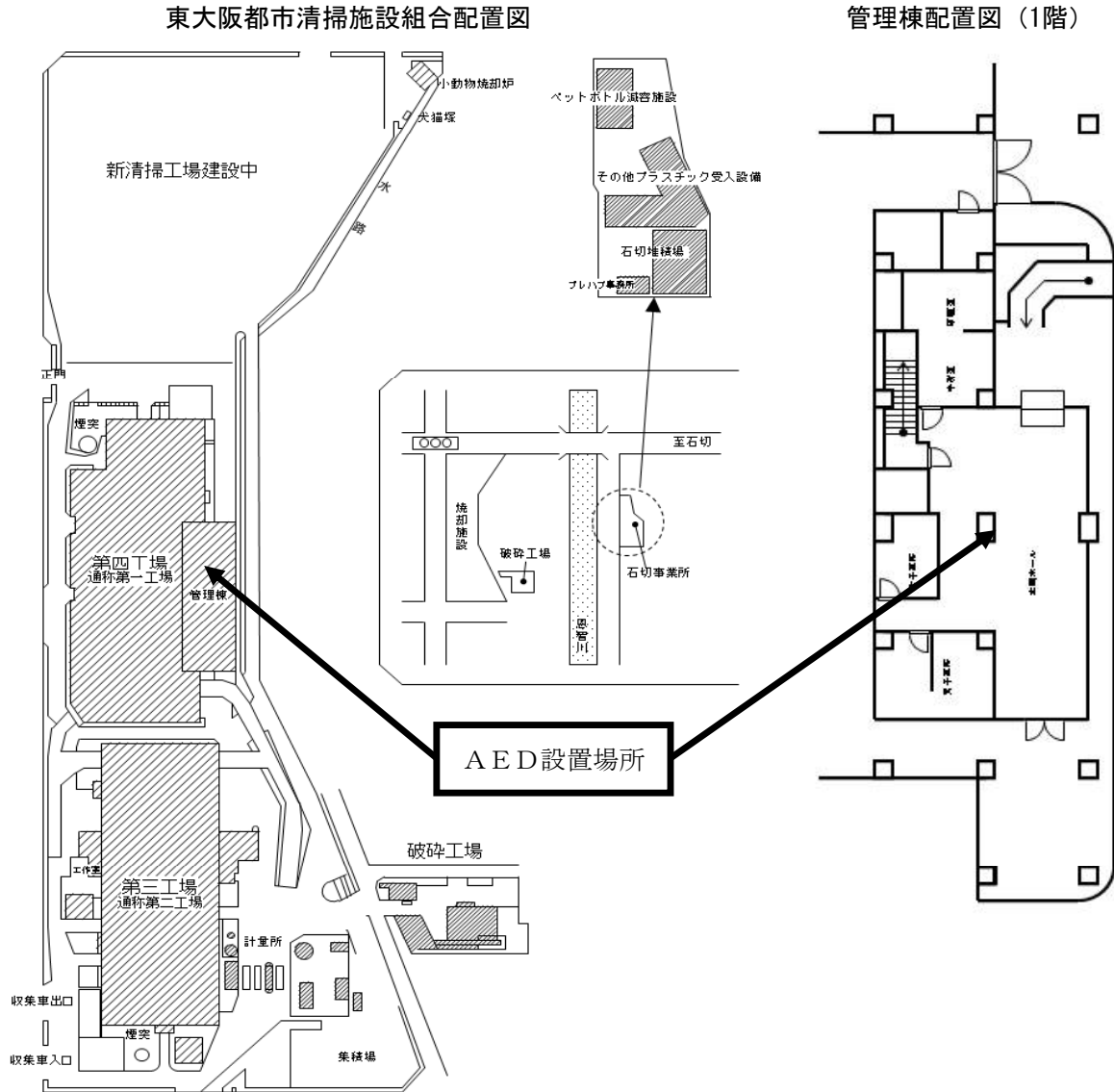

◆一般の方が除細動を行えるように、A E Dを使えば除細動が必要かどうか判断できるようになっています。

◆A E D使用の概略

1. 声をかけ意識を確認する。反応がなければ、心肺停止の可能性があるので、119番に通報、A E Dの確保など周囲に応援を求める。
2. 呼吸をしているか確認する。呼吸停止していればA E Dが届くまで人工呼吸や心臓マッサージなどの心肺蘇生法を行う。
3. A E Dが届いたら、電源を入れ患者の胸に正しく電極パッドを張り、A E Dの指示に従う。
4. A E Dが自動的に心電図を解析し、必要であれば自動で充電する。
5. A E Dの指示に従い、安全を確認して除細動ボタンを押す。
6. A E Dの指示に従い、救急隊に引き継ぐまで手当てを続ける。